

## **Behelfs-Mund-Nasen-Schutz im Pandemiefall (BMNS)**

### **1. allgemeine Information**

Es wird darauf hingewiesen, die Nase-Mundbedeckung nach jedem Tragen zu waschen.

Unsere Baumwolle ist problemlos bei 60 Grad Celsius waschbar, bei höheren Temperaturen kann die Farbe bei oftmaligem Waschen verblassen. Es wird empfohlen, die BMNS nach jedem Tragen zu wechseln und zu waschen.

Dieser Mundschutz ist weder geprüft noch zertifiziert. Es handelt sich lediglich um einen BEHELFF, sofern die zertifizierten Einmal-Mund-Nasen-Schutzmasken im Pandemiefall nicht mehr verfügbar sind.

Der BMNS soll die Verbreitung von Tröpfchen durch den Träger reduzieren (Patientenschutz / Umkehrisolierung). Er stellt somit keinen Eigenschutz dar und ist in seiner Wirksamkeit abhängig von der Dichte des verwendeten Stoffs. Eine zusätzliche Einlage von Vliesmaterialien kann die Wirksamkeit signifikant erhöhen.

Die Übertragung von z.B. Coronaviren erfolgt durch Tröpfchen, die u.a. beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen können. Die Tröpfchen können auch auf Oberflächen treffen und diese kontaminieren.


Direkter Händekontakt mit den Oberflächen, die mit virushaltigen Sekreten kontaminiert sind und ein anschließender Hand-Mund-Nasen-Kontakt kann ebenfalls zur Übertragung führen.

Das Tragen des BMNS kann möglicherweise die Übertragungswege reduzieren. Es ist sinnvoll, bei jeder Begegnung mit Risikopersonen oder in der Öffentlichkeit einen BMNS zu tragen, um die Verteilung von Tröpfchen auf Kontaktpersonen zu verhindern.

### **2. Pflege & Reinigung des waschbaren BMNS**

Der waschbare BMNS ist grundsätzlich trocken zu lagern. Vor der ersten Benutzung ist der BMNS zu waschen. Nach der Benutzung ist dieser vorsichtig auszuziehen, die Berührung der Außenfläche ist dabei zu vermeiden. Nach dem Ausziehen sollte eine Händewaschung und -desinfizierung durchgeführt werden.


Gebrauchte BMNS sollten mindestens 1x täglich gewechselt und gereinigt werden. Die Reinigung erfolgt in der Waschmaschine beim mindesten 60 Grad Celsius oder auf dem Herd in einem Wasserbad. Anschließend trocknen.

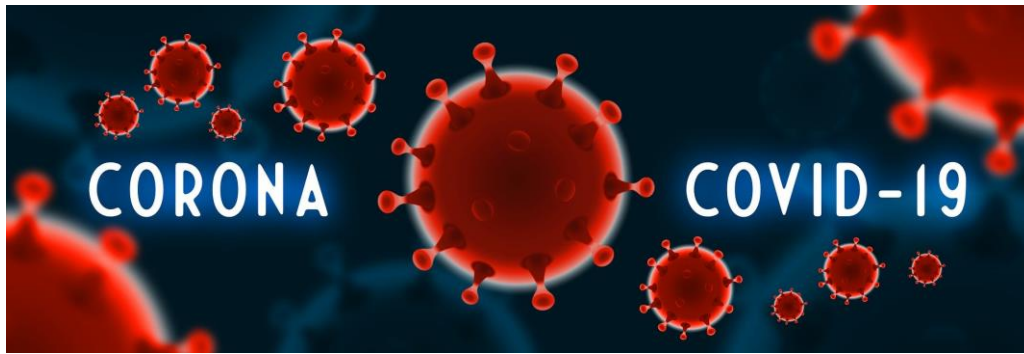

**Kochwäsche:** für Maschinen- bzw. Handwäsche. Die empfohlene Waschttemperatur in Grad Celsius darf nicht überschritten werden.



**60°C-Buntwäsche:** nicht kochfeste Buntwäsche, Baumwolle, Modal und Polyester oder deren Mischungen

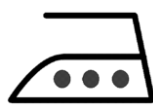

### 3. Haftungsausschluss

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verkäufer keine Haftung für die Wirksamkeit, die Herstellung oder die sachgerechte Verwendung des BMNS übernimmt. Jeglicher Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verkäufer wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber – ist ausgeschlossen. Die Verwendung des BMNS erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.